

Geratherm non contact Fieberthermometer



Artikel-Nr. GT-101



Berührungslos Fieber messen mit Infrarot-Technik:

- 100% hygienisch und höchster Komfort, da kein direkter Hautkontakt und somit eine reduzierte Übertragung von Keimen und Krankheitserregern
- Präzises Messen von Körpertemperatur, sowie der Temperatur von Flüssigkeiten, Oberflächen und Objekten
- Messbereich Körpertemperatur: 34,0 °C – 42,2 °C (93,2 °F – 108,0 °F);
Messbereich Objektmodus: 0 °C – 100 °C (32 °F – 212 °F)
- Messdauer: ca. 3 Sekunden im Abstand von 1 – 5 cm
- Hohe Messgenauigkeit: (+/- 0,2 °C / +/- 0,4 °F)
- Einfache Umschaltung von °C und °F
- Visueller und akustischer Fieberindikator
- Speicher für bis zu 30 Messungen
- Klinisch getestet
- Batterielebensdauer: ca. 1.000 Messungen;
automatische Abschaltung nach 3 Minuten
- Mit praktischer Halteschale und 2 x 1,5 Volt Alkaline AAA-Batterien



Geratherm non contact

Fieberthermometer

FAQ's

1. Was sind die Vorteile des Thermometers?

- Berührungslose Temperaturmessung innerhalb von 3 Sekunden.
- Fieber messen ohne unangenehme Berührung, ohne Entkleiden.
- Fieber messen mehrfach wiederholbar.
- Sicher & hygienisch: kein direkter Hautkontakt, keine Übertragung von Viren, Keimen und Erregern.
- Multifunktional: Erweiterter Messbereich (0 °C – 100 °C).
- Visueller und akustischer Fieberalarm.

2. Wie schalte ich zwischen Körper- bzw. Objektmodus um?

- Drücken Sie die Modus-Taste, wenn das Thermometer an ist.

3. Wie messe ich richtig?

- Person und Thermometer ca. 30 Minuten im selben Raum akklimatisieren.
- ON/OFF-Taste drücken, danach erscheint auf dem Display der zuletzt gemessene Wert.
- 4 Sekunden warten bis das °C oder °F-Symbol blinkt und ein Signalton ertönt.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im richtigen Modus befinden. Schalten Sie ggf. in den gewünschten Modus um (Kopf- oder Objektmodus).
- Thermometer 1 – 5 cm von der Stirnmitte entfernt halten und den START-Knopf drücken.
- Thermometer gleichmäßig oberhalb der Augenbraue seitlich zur Schläfe bewegen (ca. 3 Sekunden lang).
- Ein Signalton bestätigt das Messende.

4. Wie reinige ich das non Contact?

- Gehäuse und Sensor mit einem feuchten Mikrofaser Tuch oder anderen fusselfreien Gewebe reinigen. Alkohol (70% Isopropanol) verwenden. Tauchen Sie das Thermometer nicht in Flüssigkeiten ein.

5. Wie schalte ich das non Contact von Fahrenheit auf Celsius um?

- Schalten Sie das Gerät mit der ON/OFF-Taste aus. Drücken Sie den START-Knopf 5 Sekunden lang. Danach leuchtet die gegenwärtige Messskala (°F-Symbol). Durch Drücken des START-Knopfes wechseln Sie zur °C-Skala. Warten Sie 5 Sekunden, bis das Gerät automatisch in den Modus „Bereit“ für die Messung wechselt.

